


# Aplikacja Thrive

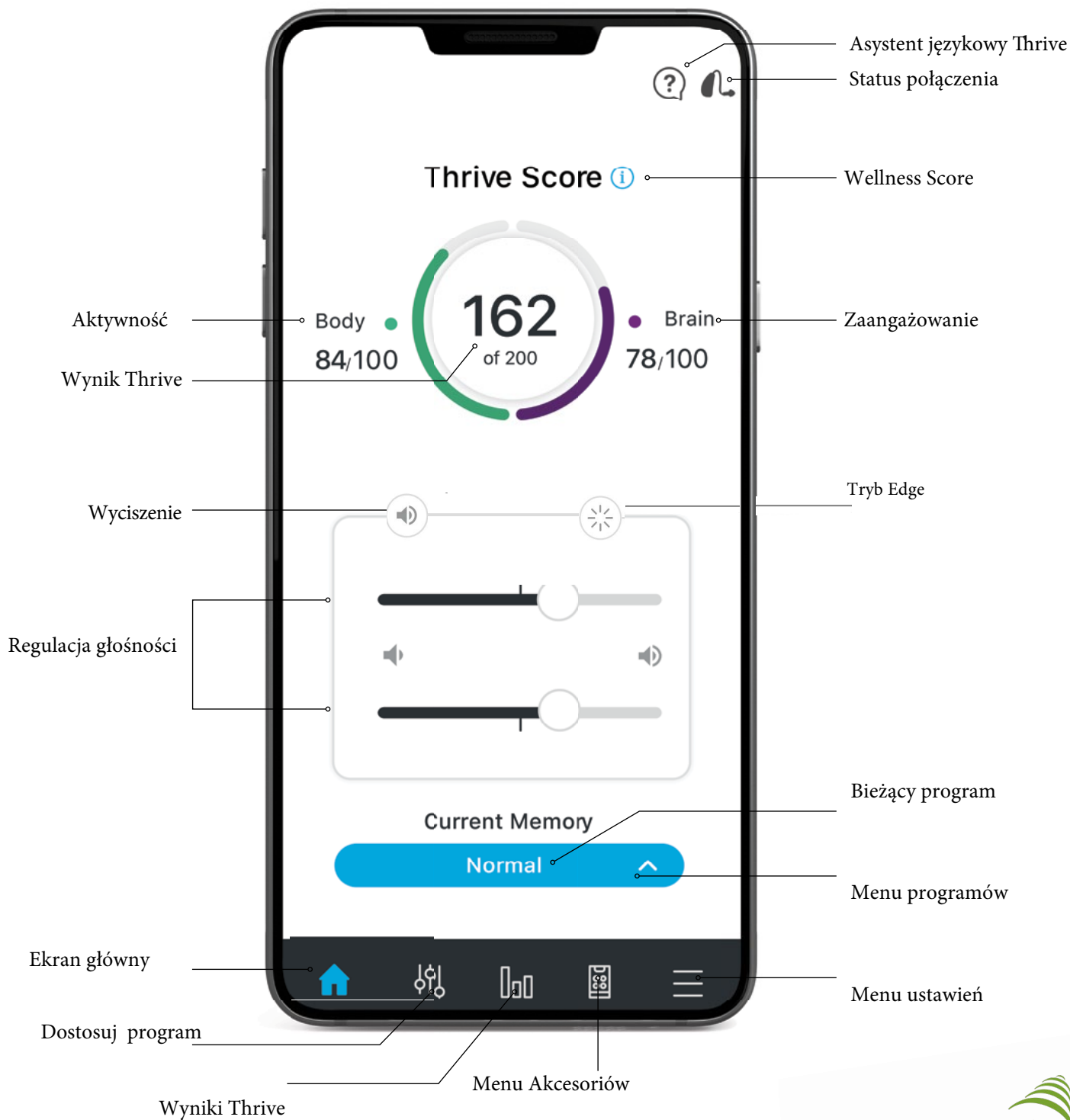


# Programy


## Personalizacja

Stwórz nowy program

Wybierz program, który zapewnia najlepszą jakość dźwięku dla aktualnego środowiska odsłuchu. Wybrany program stanowi punkt odniesienia dla regulacji.

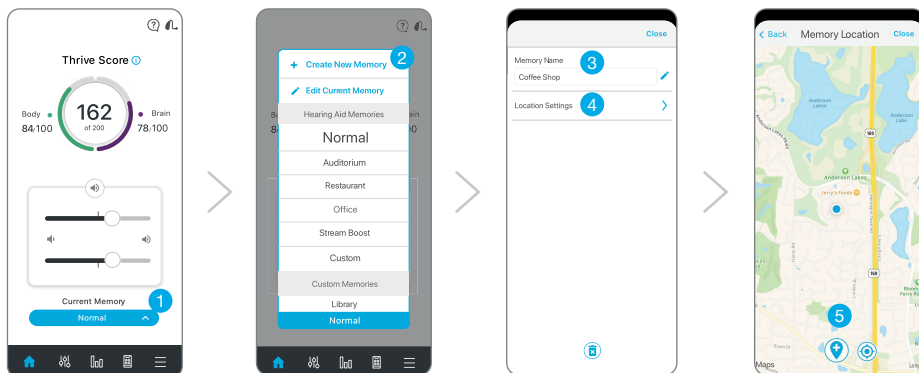


## Tworzenie własnego programu:


- 1 Menu Programy
- 2 +stwórz nowy program
- 3 Nazwa programu
- 4 Ustawienia lokalizacji
- 5 Ustaw lokalizację: Przypisz program do lokalizacji (na dole mapy), naciśnij  aby przypisać geolokalizację.

Każdy program ustawiony przez protetyka w Inspier X, będzie miał przypisaną nazwę. W celu zmiany nazwy, Edytuj bieżący program i dokonaj korekty.

**Smart VC** Pozycja głośności jest zapisywana i ustawiana dla programów niestandardowych, aby zapewnić bardziej spójne wrażenia użytkownika.

## Program indywidualny

Dostępnych jest kilka funkcji umożliwiających tworzenie programów indywidualnych. Aby rozpocząć tworzenie nowego programu należy wybrać opcję dostosuj  z paska nawigacji.

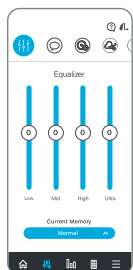


### Korektor Dźwięków

Umożliwia bardziej precyzyjną regulację barwy dźwięku.




### Użyj w mowie

Poprawia rozumienie mowy w obecności hałasu w tle.

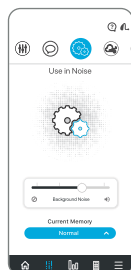

### Użyj w hałasie

Zwiększa komfort słuchania w obecności hałasu maszyn.

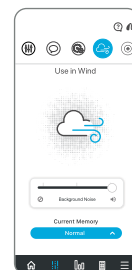


### Użyj w wietrze

Ułatwia słyszenie w wietrze dni.

## Kierunek mikrofonu

Dostosuj, skąd mikrofony odbierają dźwięki. Stuknij ikonę, aby wybrać:

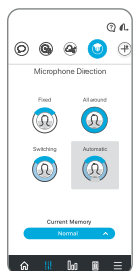

### Z przodu

Wzmocnia słyszenie na wprost.

### Wszystko wokół


Dźwięki wzmocniane są tak samo niezależnie od kierunku z którego padają.

### Przełączenie

Automatyczne przełączenie kierunku między słyszeniem kierunkowym a wszechkierunkowym w oparciu o środowisko.

### Automatyczne

Wykorzystuje adaptacyjne sterowanie w celu ochrony mowy ze wszystkich stron.

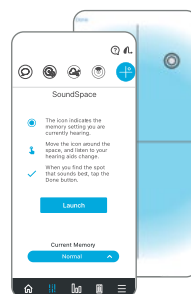


### Punkt Dźwięku

Naciśnij Uruchom, następnie poruszaj pulsującą ikoną po ekranie. Po znalezieniu żądanej jakości dźwięku wybierz opcję Gotowe w lewym górnym rogu ekranu.


## Wyniki Thrive

Wynik Thrive przedstawia wynik ogólnej kondycji organizmu poprzez podanie łącznej wartości aktywności fizycznej i funkcji poznawczych. Dzienny wynik Thrive Score może wynieść 200 punktów.

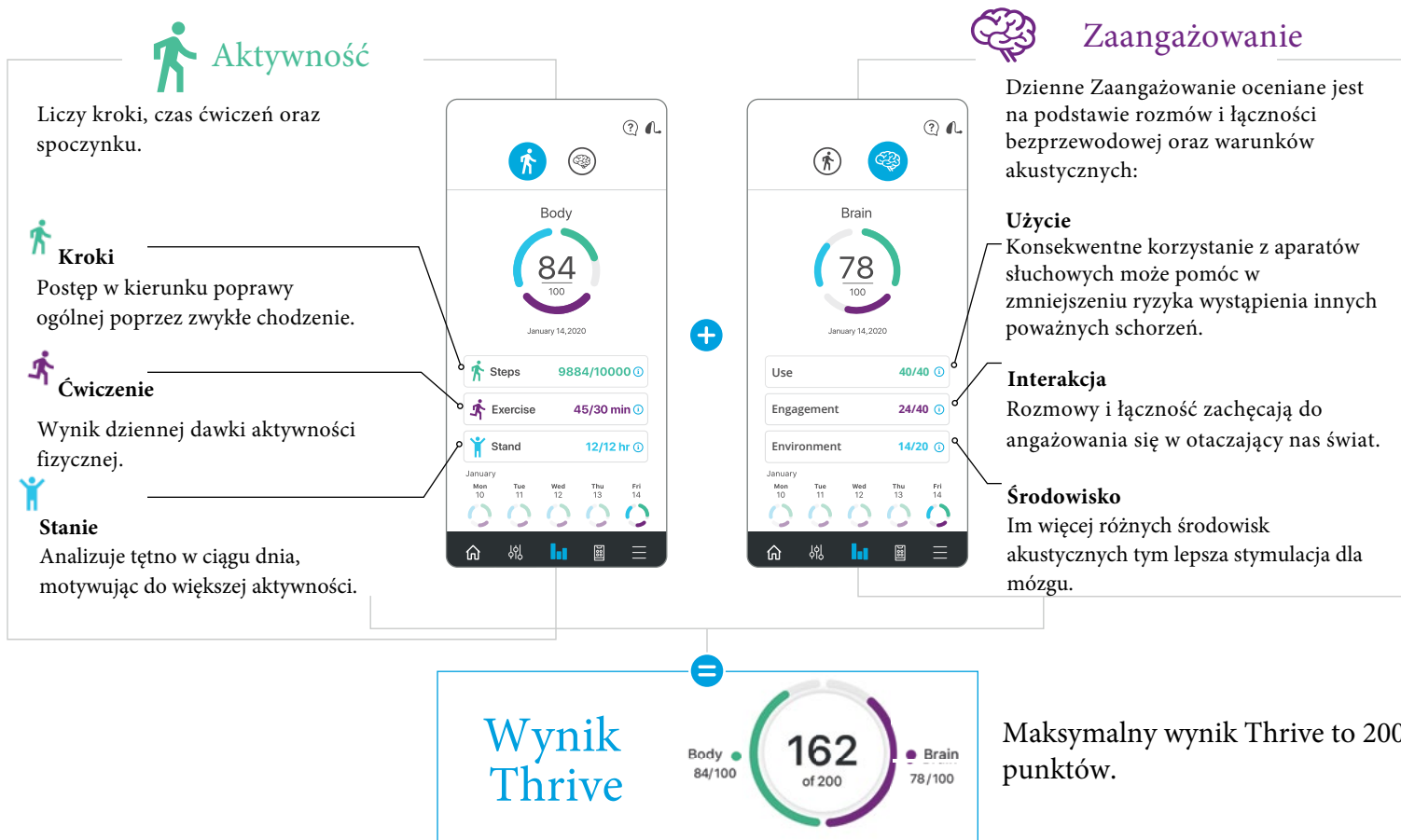

## Powiadomienie o upadku

Funkcja Fall Alert wykorzystuje zintegrowane czujniki do automatycznego wykrywania upadków i wysyłania wiadomości tekstowych z ostrzeżeniem do wybranych kontaktów.

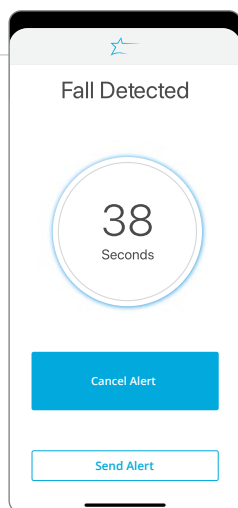

### Auto alarm

Wykrycie upadku powoduje automatyczne uruchomienie alarmu

\*nie można uruchomić gdy jest ustawiona opcja Auto On/Off

### Manual alarm

Aby zainicjować alarm, należy nacisnąć kontrolkę użytkownika.


## Akcesoria


Wyświetlanie sparowanych akcesoriów.

Aktywacja funkcji **IntelliVoice** 

Dzięki możliwościom sztucznej inteligencji, ta zawsze ucząca się funkcja wykorzystuje smartfon użytkownika, aby zapewnić niespotykane dotąd wrażenia osobom z ubytkiem słuchu. Dostępna tylko dla technologii Edge AI i systemu iOS.


Menu Akcesoriów:

- Uruchamianie/zatrzymywanie strumieniowej transmisji dźwięku
- Regulacja głośności akcesorii
- Regulacja poziomu głośności mikrofonu aparatu słuchowego podczas używania akcesoriów
- Edycja nazwy akcesorium przez dotknięcie  przycisku w pobliżu akcesorium
- Usuń sparowane akcesorium

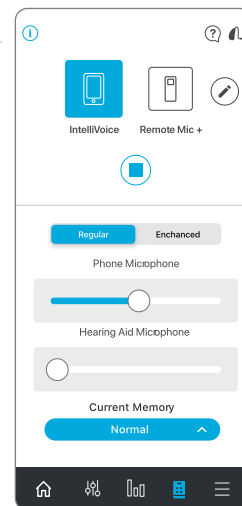


## Asystent Thrive

Thrive Assistant to oparty na aplikacji asystent, który zapewnia pomoc bez użycia rąk, kiedykolwiek i gdziekolwiek jest potrzebny. Użytkownicy mogą wygodnie zadawać pytania, rozwiązywać problemy z aparatami słuchowymi i akcesoriami lub po prostu wypowiedzieć polecenie, aby zmienić głośność aparatów słuchowych, wyciszyć je, zmienić pamięć lub ustawić przypomnienie. Można nawet powiedzieć "znajdź mój telefon" lub "zgubiłem telefon", a Thrive Assistant pomoże użytkownikowi odnaleźć zgubiony smartfon, odtwarzając dzwonek z telefonu, nawet jeśli jest on zablokowany lub w trybie cichym.

1 Wybierz  w rogu aplikacji Thrive, aby uzyskać dostęp do Asystenta Thrive. Użytkownicy AI mogą dwukrotnie "stuknąć", aby uzyskać dostęp do Asystenta Thrive, jeśli ta opcja została ustawiona przez Protetyka.

2 Thrive Assistant zasygnalizuje "Proszę zadać swoje pytanie".

3 Wydadź polecenie lub zadaj pytanie. Asystent Thrive wykona polecenie lub wyszuka i poda odpowiednią odpowiedź na zadane pytanie szukając informacji w narzędziach Thrive lub usługach znajdujących się w chmurze.

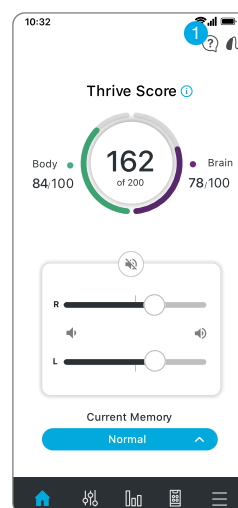

## Tłumacz

\*dla aparatów Edge AI


Podłączenie do usług w chmurze umożliwiających tłumaczenie jednego języka na drugi


Kiedy użytkownik mówi do mikrofonu telefonu, jego słowa są tłumaczone i zapisywane na ekranie.

Przetłumaczona mowa jest przesyłana do aparatu słuchowego użytkownika.

**Aby uzyskać dostęp do tłumaczenia języków, przejdź do:**

**Ustawienia > Tłumacz**

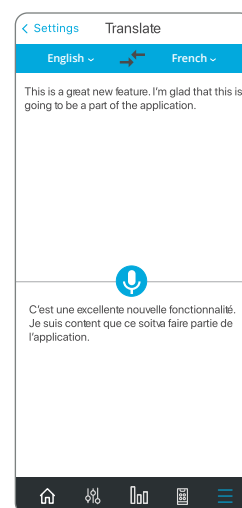

- 1 Wybierz język użytkownika po lewej stronie i język rozmówcy po prawej stronie.
- 2 Naciśnij przycisk mikrofonu 
- 3 Użytkownik mówi do mikrofonu telefonu.
- 4 Słowa użytkownika są zapisywane na górze ekranu, a tłumaczenie na dole.
- 5 Przetłumaczona mowa jest przesyłana do podłączonego aparatu słuchowego.



## Transkrypcja

Funkcja Transkrybuj nasłuchuje mowy w wybranym języku i wyświetla wykrytą mowę jako tekst na ekranie.

**Aby uzyskać dostęp do transkrypcji języków, przejdź do: Ustawienia > Transkrypcja**

- 1 Wybierz język, który chcesz wykryć dotykając niebieskiego paska u góry ekranu i wybierając język.
- 2 Naciśnij przycisk mikrofonu. 
- 3 Mowa jest wykrywana przez mikrofon telefonu i przepisywana na ekran.
- 4 Naciśnij  aby zapisać wiadomość, skopiować lub przesłać pocztą elektroniczną transkrypcję




## Samodiagnostyka

Funkcja Samodiagnostyka umożliwia pacjentom szybką i wygodną analizę działania ich aparatów słuchowych bezpośrednio z aplikacji Thrive.

**Aby uzyskać dostęp do Samodiagnostyka przejdź Ustawienia > Samodiagnostyka**


Samodiagnostyka umożliwia pacjentom szybką i wygodną analizę działania ich aparatów słuchowych bezpośrednio z aplikacji Thrive.

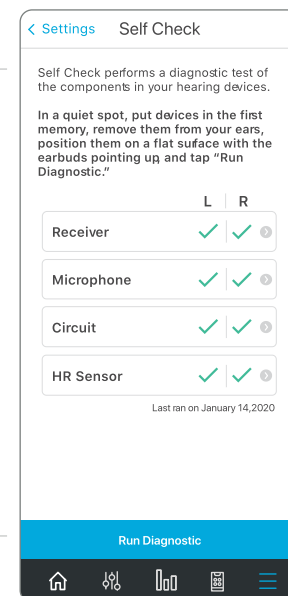


## TeleHear

Umożliwia zdalne połączenie z protetykiem słuchu w celu zaprogramowania aparatu słuchowego.

Weź udział w sesji na żywo z wykorzystaniem czatu wideo w celu dopasowania aparatów słuchowych w czasie rzeczywistym.

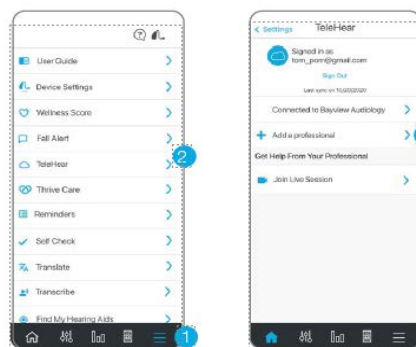

- 1 Aby uzyskać dostęp do TeleHear przejdź :
- 2 Ustawienia > TeleHear
- 3 Naciśnij Dodaj specjalistę.
- 4 Wprowadź kod wygenerowany w programie Inspire X.
- 5 Dotknij przycisk Prześlij. W aplikacji Thrive będzie widoczna możliwość zdalnego połączenia z Protetykiem Słuchu. Konfiguracja została zakończona.

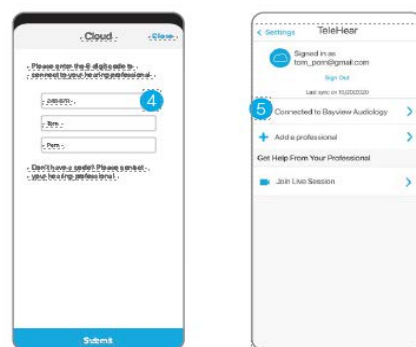


## Przypomnienia

Pozwala na ustawienie informacji o spotkaniach, przyjmowaniu leków, realizacji recept lub innych osobistych zadaniach. W przypadku ustawienia przypomnienia, w aparatach słuchowych oraz na ekranie smartfona pojawi się alert.

**Aby uzyskać dostęp do Przypomnienia przejdź :  
Ustawienia > Przypomnienia**


Naciśnij **+** Nowe przypomnienie

- Wybierz nazwę przypomnienia z listy lub utwórz własne.
- Wybierz preferencje przypomnienia, takie jak data/czas, powtarzanie przypomnienia i przypomnienie dźwiękowe.

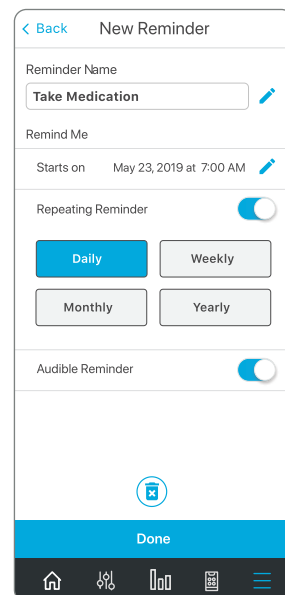


## Tinnitus

Dostosuj głośność i szybkość modulacji bodźca dla szumów usznych w programie, który został skonfigurowany dla programu Tinnitus lub programu indywidualnego opartego na programie Tinnitus. Funkcja tinnitus będzie widoczna w aplikacji Thrive, jeśli Protetyk Słuchu aktywuje program do szumów usznych w trakcie dopasowania aparatów słuchowych.

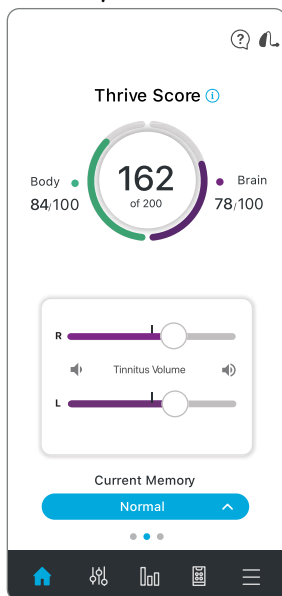

### Regulacja Tinnitus Głośność

Dostosuj głośność szumów usznych indywidualnie lub przesunij palcem po suwaku, aby wyregulować głośność obuusznie. Stuknij dwukrotnie, aby powrócić do domyślnej głośności bodźca.

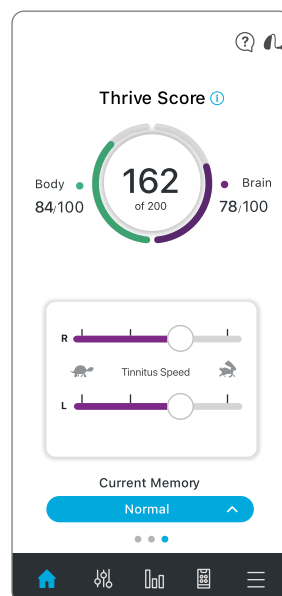


### Regulacja Tinnitus Szybkość

Przesuń ikony na suwakach, aby zmienić ustawienie z braku modulacji (w lewo) na szybką modulację (w prawo).

## CROS System

Dostosuj balans dźwięku z nadajnika względem odbiornika w programie który zostały skonfigurowane dla BiCROS lub w programie utworzonego na jego podstawie. Ekran Balance (Balans) będzie widoczny w aplikacji Thrive, jeśli program słuchowy będzie miał funkcję BiCROS w bieżącym programie.

- 1 Przeciągnij ikonę okręgu wzdłuż suwaka, aby dostosować balans dźwięku między odbiornikiem a nadajnikiem.
- 2 Jeśli chcesz wyciszyć nadajnik wybierz opcję Wycisz.

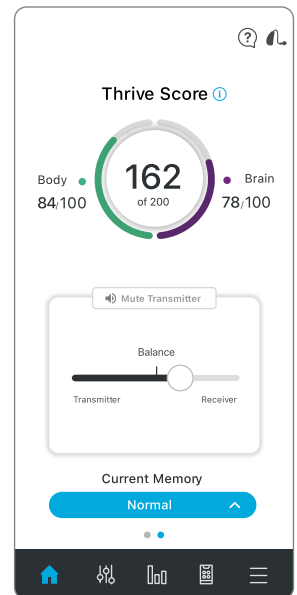

## Inne

Ponadto, dodatkowe udogodnienia:

- Podręcznik użytkownika
- Ustawienia urządzenia
- Znajdź moje aparaty słuchowe
- Informacje
- Ustawienia aplikacji
- Tryb demo

Wersja podstawowa aplikacji nie posiada:

- Wyników Thrive
- Dostosuj program
- Przypomnienia
- Transkrypcji
- Menu Akcesorii
- TeleHear
- Tłumacza
- Samodiagnostyki

Features may vary by country.

<sup>1</sup>Available in AI products only. <sup>2</sup>Accessories only pair to hearing aid (not to iPhone/app). <sup>3</sup>Must be connected to the Internet for use. Language Translation only available in AI products. | The app may look slightly different based on your phone and/or hearing aid model. Starkey logo, Thrive, Thrive Logo, Inspire, IntelliVoice, SoundSpace and Hearing Care Anywhere are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

©2022 Starkey. All Rights Reserved. 9/22 FLYR3406-07-PL-AB